


krotāliju ielikšanas pamācība



1 Uzlieciet krotālijas tapīņas daļu (mazākā pusīte) uz krotāliju stangu adatas, līdz tā atduras.

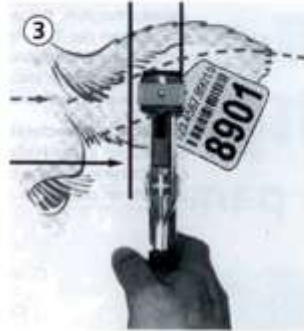

3 Stangas novieto tā, lai krotālija atrastos starp abām auss skrimšļa līnijām, **ne tuvāk kā 1/3 un ne tālāk kā 1/2 no auss pamatnes, ar krotālijas lielāko pusi auss iekšpusē un ar mazāko pusi auss ārpusē, un vienreiz spēcīgi saspiež.**



2 Viegli uzspiediet uz stangu baltās skavas (apm. 5mm), ielieciet krotālijas cauruma daļu (lielākā pusīte) līdz tā atduras, un atlaidiet skavu. Pārbaudiet vai krotālijas abās pusēs ir viens un tas pats identitātes numurs.

Tad palaidiet vienu stangas rokturi vajā, lai tās atvērtos un atbrīvotu krotāliju.



4 Pēc desmit dienām pārbaudiet krotālijas radīto brūci un, ja nepieciešams, dezinficējiet to.

Uzmanību! Ja krotālija ir ielikta citādāk nekā norādīts pamācībā, krotāliju ražotājfirma **negarantē krotāliju "noturību" ausī.**